

ZEO CE LIGHT

Керамика высокого класса



Керамика высокого класса, для упрощённой схемы нанесения.
Опак-Дентин-Эмаль



Содержание

Презентация керамической массы Zeo Ce Light ----- стр. 2-3

Характеристики и особенности Zeo Ce Light ----- стр. 4-5

Этапы нанесения Zeo Ce Light ----- стр. 6-7

Перечень продукции и таблица оттенков Zeo Ce Light ----- стр. 8-9

Наборы керамических масс Zeo Ce Light ----- стр. 10-11

Презентация и особенности керамической массы Zeo Quick ----- стр. 12-13

Таблица оттенков Zeo Quick ----- стр. 14

Программа обжига Zeo Ce Light / Zeo Quick ----- стр. 14

О биологической безопасности материалов Yamakin ----- стр. 15

 При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.


*Удовлетворяет требованиям
самых искушенных зубных техников*

*Дает возможность продемонстрировать
все грани Вашего мастерства*



ZEO CE LIGHT обладает физическими свойствами полностью синтетической керамической массы высокого уровня. На рынке существует множество керамических масс, однако ZEO CE LIGHT получила одобрение и заинтересованность проницательных клиентов и зубных техников, которые оценили качество выполненных работ и их сходство с натуральными зубами. В последние годы эстетическая стоматология, отбеливание и ортодонтическое лечение набирают все большую популярность. Компания YAMAKIN Co., LTD. следит за новыми веяниями в мировой стоматологии, продолжая улучшать качество имеющихся продуктов и разрабатывая новые.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ РЗН 2015/3440 от 18.12.2015

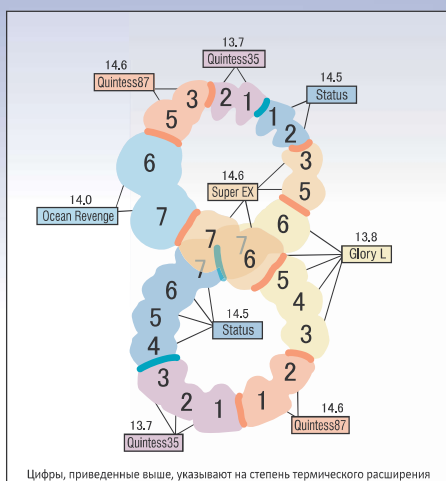

Совершенству нет предела

Специалистами компании YAMAKIN Co., LTD. изготовлена данная конструкция. Конструкция была подвержена 11-и кратной пайке и 17-и кратному обжигу - без появления трещин, сколов и изменения формы и цвета.

**#YamakinChallenge
#TeethChallenge**

Вы будете довольны результатом!



 При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Характеристики ZEO CE LIGHT

Идеальная температура плавления, сохранение формы под воздействием температуры и прочное слияние с любым металлом предотвращает появление трещин.

Такие оптические характеристики, как флуоресцентность, прозрачность, опалесценция и цветопередача, обеспечивают вид, максимально приближенный к натуральным зубам.

Флуоресценция, аналогичная натуральному зубу

Натуральные зубы состоят из эмали, дентина и дентальной пульпы, имеют различную степень флуоресценции и флуоресцируют под действием ультрафиолетовых лучей. Продукт ZEO CE LIGHT с точностью воспроизводит флуоресценцию натуральных зубов.



Флуоресценция натурального зуба и керамики Zeo Ce Light

Опалесценция

Натуральные зубы имеют характерный бледный (в отраженном свете) и оранжевый (в проходящем свете) оттенки, которые передают натуральный цвет зубов. Этот эффект называется опалесценцией - важной составляющей в воспроизведении цветовых особенностей натуральных зубов.




Опалесценция натурального зуба и керамики Zeo Ce Light

Безопасное удаление жёлтого оттенка

В настоящее время большинство керамических материалов содержат опасные элементы, призванные убрать оттенки жёлтого, появляющиеся при использовании серебросодержащих сплавов. Используя новые технологии в области химии, ZEO CE LIGHT эффективно подавляет эффекты изменения цвета без использования вредных химических элементов (без добавления диоксида церия).

Керамическая масса ZEO CE LIGHT была разработана с заботой о здоровье людей и чистоте окружающей среды по всем параметрам биосовместимости.

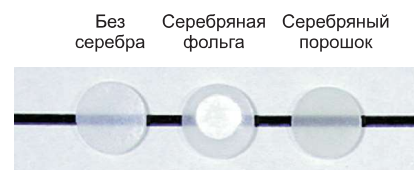


Тест на обесцвечивание прозрачных керамических масс


Точное воспроизведение цвета натурального зуба

Для того, чтобы воспроизвести точный цвет натурального зуба, необходимо использовать прозрачную керамическую массу, оттенок которой задается цветовыми пигментами. ZEO CE LIGHT производится из абсолютно прозрачного базового керамического материала.


В линейке продукции ZEO CE LIGHT представлена особая керамическая масса "Акцент" для достижения точной передачи оттенка натуральных зубов.

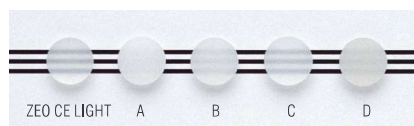

Прозрачность керамических масс

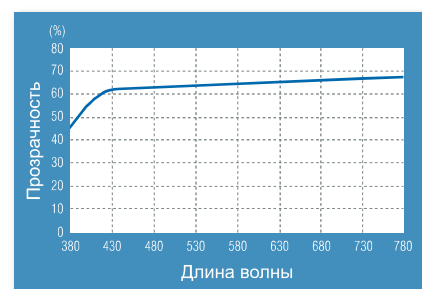


Кривая коэффициента светопропускаемости

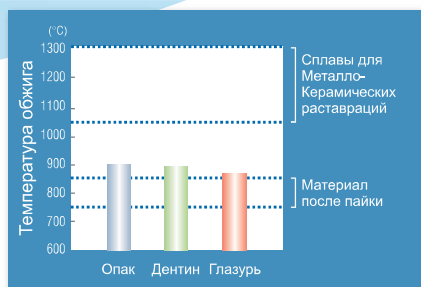

Температура обжига керамической массы

Идеальная температура обжига

Температура обжига керамической массы ZEO CE LIGHT от 880°C до 920°C. Такой диапазон температур не представляет опасности для металлического каркаса и материалов пайки. Температура обжига не оказывает пагубного влияния на характеристики керамики и таким образом является идеальной для металлокерамических реставраций.

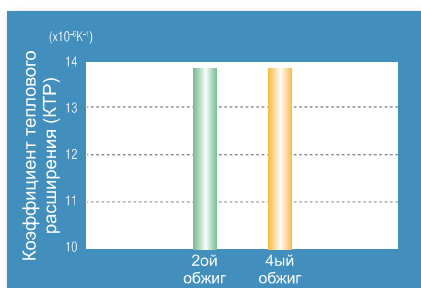

Изменение термального расширения при многократном обжиге

Отсутствие появления сколов при устойчивом КТР

ZEO CE LIGHT - это уникальная керамика, совместимая практически с любыми сплавами. Сколы, вызванные неправильным подбором металла, частое явление в существующих керамических массах. В керамике ZEO CE LIGHT синтетические кристаллы лейцитов (минералов) расположены особым образом - это обеспечивает стабильный КТР* и препятствует сколам даже при многократных обжигах.

* (коэффициент термического расширения).




Результаты теста на появление сколов керамики с различными видами сплавов

Устойчивость к сколам

Металлокерамический реставрационный материал ZEO CE LIGHT не имеет таких проблем, как сколы и трещины.

Керамика ZEO CE LIGHT устойчива к сколам даже в соединении со сплавами, где КТР* составляет 13,7 ~ 14,6.

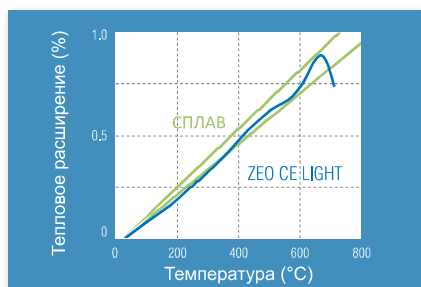

КТР керамической массы ZEO CE LIGHT и сплавов

Высокая адгезия к сплавам

Для увеличения уровня адгезии к сплавам используются опаконные массы. В керамике ZEO CE LIGHT они разделены на два вида: Супер Опак Super Opaque и Опак Ораче. Супер Опак Super Opaque обладает свойствами бондинга (высочайшей адгезией к металлу). Цветовой Опак Ораче имеет такой же цвет, как и Дентин Dentine. Такой подход позволяет решить проблему сколов, трещин и отслоений после примерки, а так же существенно увеличить прочность соединения металла и керамики.

Этапы нанесения керамической массы ZEO CE LIGHT

Супер Опак / Super Opaque



Наносим Супер Опак Super Opaque (Применяйте Супер Опак Super Opaque достаточно густо, чтобы покрыть цвет пленки оксида металла).




Наносим Супер Опак Super Opaque (Применяйте Супер Опак Super Opaque достаточно жидко).

Опак / Opaque



Наносим Опак Opaque после Супер Опака Super Opaque

После обжига (O-A3)

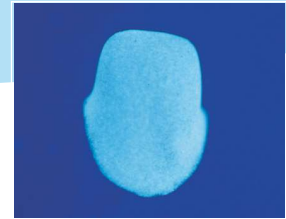

Флуоресценция Опака Opaque

Дентин / Dentine




Наносим Дентин Dentine (D-A3)

Опак-Дентин Opaque Dentine

*Используем Опак-Дентин Opaque Dentine при недостатке места для Дентина Dentine в пришеечной области.


Место для Эмали / Enamel

Необходимо освободить достаточное количество места для нанесения Эмали Enamel

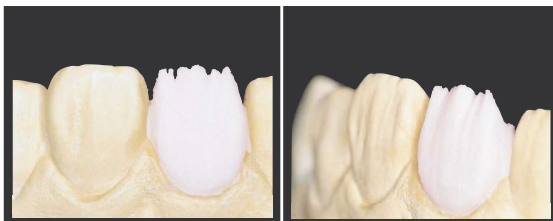


Акцент / Accent

Для подчёркивания цветовых особенностей натурального зуба используйте массу Акцент Accent

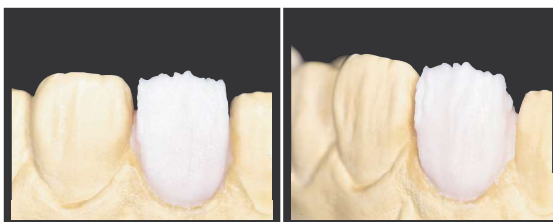

Эмаль / Enamel

Наносим Эмаль Enamel (E-3)

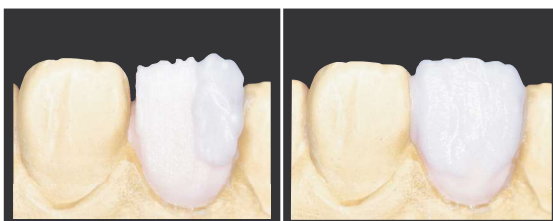

Финальная флуоресценция


Завершение




Основные этапы нанесения керамической массы ZEO CE LIGHT




Фронтальный зуб (с Опаловой массой)

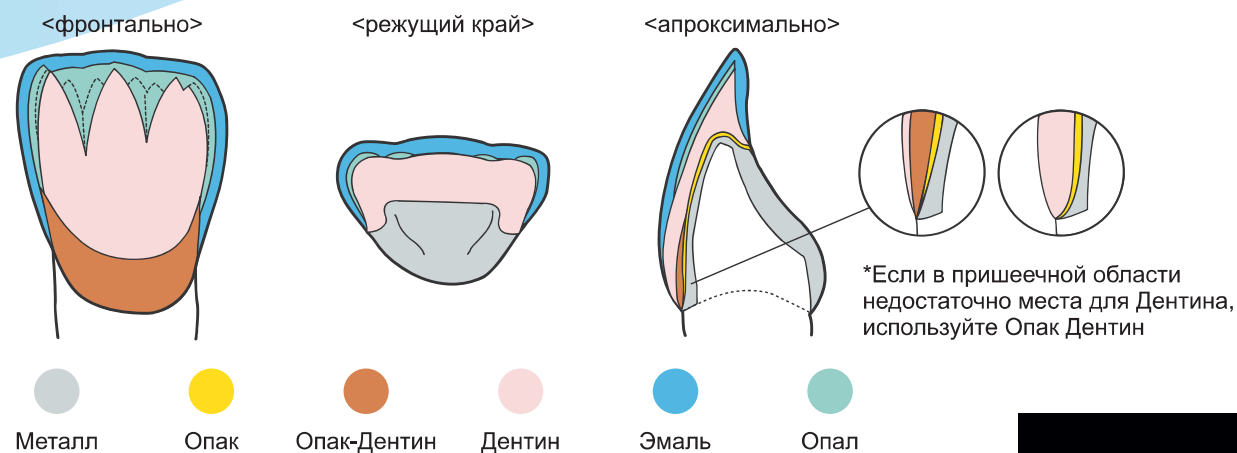

Фронтальный зуб (с Прозрачной массой)

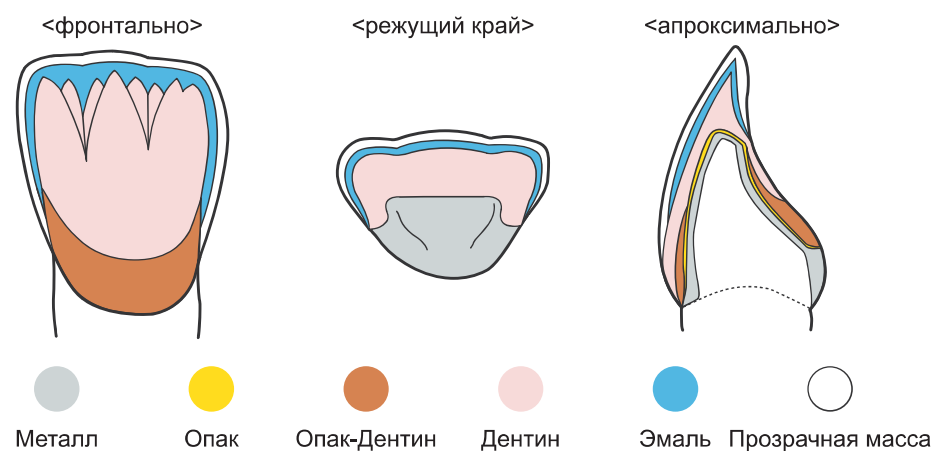

Жевательный зуб

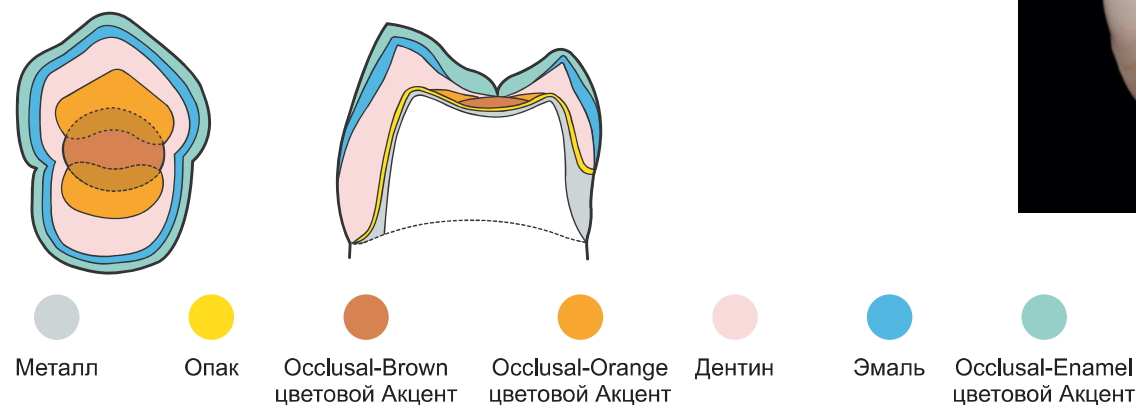

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Продукция ZEO CE LIGHT

Основные массы

Супер Опак Super Opaque: 1 цвет/3.5г (Паста), 50г (Порошок)
Увеличивает прочность соединения сплава с металлическим покрытием. Обладает свойством Бондинга. Используйте эту основу для получения лучшего результата.

Опак Opaque: 18 цветов/3.5г (Паста)
Используйте необходимый Опак для нужного оттенка дентина.

Опак VO Opaque VO: 16 цветов/3.5г (Паста), 50г (Порошок)
Используйте для максимального соответствия шкале VITA.

Плечевая масса Margin2004: 5 цветов/5г (Порошок)
Плечевая масса. Используйте для разделения с гипсом. Сепаратор Margin Separator.

Опак-Дентин Opaque Dentine: 18 цветов/20г, 50г, 200г (Порошок). Используйте как основу при недостаточном количестве места для Дентина.

Дентин Dentine: 18 цветов/20г, 50г, 200г (Порошок)
Используйте для создания формы и основного цвета. Дентины оттенков А имеют более красный оттенок, по сравнению с оттенками VITA. При необходимости соответствия оттенкам А по шкале VITA используйте дентин VD.

Дентин VD Dentine VD: 5 цветов/20г, 50г, 200г (Порошок)
Используйте если необходимо соответствие основной палитре оттенков VITA (для Дентинов D).

Дентин VSP Dentine VSP: 1 цвет/20г, 50г, 200г (Порошок)
Используйте для модификации оттенка А - спектра. Если необходимо изменить оттенок А, чтобы соответствовать основной палитре оттенков VITA. Смешайте Dentine VSP и Dentine.

Эмаль Enamel: 4 цвета/20г, 50г, 200г (Порошок)
Используйте для нанесения слоя эмали, соответствующей цвету натурального зуба.

Опаловая эмаль Opal Enamel: 5 цветов/20г, 50г, 200г (Порошок). Используйте для воспроизведения слоев натурального зуба и достижения эффекта опалесценции.

Транслюцент Translucent Natural: 1 цвет/20г, 50г, 200г
Прозрачная фарфоровая основа. Применяйте с Accent T-Clear для большей прозрачности, T-Opacity для меньшей прозрачности, T-Glass для высокой прозрачности.

Дополнительные массы

Акцент Accent: 24 цвета/20г (Порошок)
*T-glass и T-Clear 20г, 50г, 200г (Порошок).
Для создания цветовых эффектов Дентина и Эмали.

Супплемент Supplement: 3 цвета/5г (Порошок)
Используйте для корректировки формы зуба после нанесения красителя Glaze. Установите температурный режим 790°C - 830°C - в зависимости от количества используемой керамической массы. Режим D - для Дентиновой массы, E - для Эмалевой Массы, T - для прозрачной массы.

Десневая масса GUM: 3 цвета/20г (Порошок)
Используйте для создания эффекта десны. Существует три оттенка, соответствующих клиническим показаниям.

Краситель Stain: 18 цветов/3.5г (Паста), 2г (Порошок)
*Glaze 3.5г (Паста), 2г, 10г (Порошок)
Используется как внутренний и внешний краситель. Цвета можно регулировать, смешав небольшое количество красителя с другими оттенками. (не смешивать с дентином!).

Жидкости

Жидкость моделировочная Modeling Liquid: 2 вида/100мл, 500мл
Жидкость для керамического порошка. Обладает большей вязкостью, чем дистиллированная вода, уничтожает засохшие части порошка и быстро создает форму. Используется для равномерного распределения пигмента краски. При использовании этой жидкости достигается идеальный цвет массы.

Жидкость для порошкового опака Powder Opaque Liquid: 2 вида/100мл, 500мл
Применяется для порошковых опаков и порошкового супер-опака.

Жидкость для опака и супер опака Opaque Liquid: 1 вид/10мл
Разбавляющая жидкость для Super Opaque и Opaque. Для использования нанесите небольшое количество на палитру и смешайте с краской (не добавлять в баночку!).

Жидкость для красителей Stain Liquid: 1 вид/10мл
Разбавляющая жидкость для красителей. Для использования нанесите небольшое количество на палитру и смешайте с краской (не добавлять в баночку!).

Сепаратор Margin Separator: 1 вид/3.5мл
Сепаратор разработан для изоляции плечевой массы от гипса.

Расцветка Color guide type (A, B, C, D, E, F)

A: 42 цвета (Super Opaque, Opaque, Dentine, Translucent)
B: 23 цвета (Opaque, Dentine, Margin2004)
C: 16 цветов (Supplement, Gum, Color Margin 2004)

D: 24 цвета (Accent)
E: 18 цветов (Stain)
F: 11 цветов (Dentine VD, VSP, Opal Enamel)

Аксессуары для комфортной работы



Циркониевый шпатель ZEO CE LIGHT
Шпатель с рабочей частью из циркона для замешивания керамики.



ZEO CE LIGHT система кистей I • II • III
Кисти из волоса колонка для нанесения керамики.



ZEO CE LIGHT подставка для кистей
Удобная подставка для трех кистей.

Цветовая шкала ZEO CE LIGHT

Основные Массы

Палитра	A0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Супер Опак Super Opaque	Super Opaque																	
Опак Оpaque	O-A0	O-A1	O-A2	O-A3	O-A3.5	O-A4	O-B0	O-B1	O-B2	O-B3	O-B4	O-C1	O-C2	O-C3	O-C4	O-D2	O-D3	O-D4
Опак VO Opaque VO	VO-A1 VO-A2 VO-A3 VO-A3.5 VO-A4 VO-B1 VO-B2 VO-B3 VO-B4 VO-C1 VO-C2 VO-C3 VO-C4 VO-D2 VO-D3 VO-D4																	
Плечевая Масса Margin	M 1 M 2 M 3 M 1 M 3 M 4 M 5 M 4 M 5																	
Опак-Дентин Opaque Dentine	OD A0	OD A1	OD A2	OD A3	OD A3.5	OD A4	OD B0	OD B1	OD B2	OD B3	OD B4	OD C1	OD C2	OD C3	OD C4	OD D2	OD D3	OD D4
Дентин Dentine	D-A0	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B0	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
Дентин VD Dentine VD	VD-A1 VD-A2 VD-A3 VD-A3.5 VD-A4																	
Эмаль Enamel	E-1 E-2 E-3 E-4 E-1 E-2 E-4 E-3 E-4 E-3 E-4																	
Опаловая Эмаль Opal Enamel	Opal E-1 Opal E-2 Opal E-3 Opal E-4 Opal E-1 Opal E-2 Opal E-4 Opal E-3 Opal E-4 Opal E-3 Opal E-4																	
Транслюцент T-Natural	T-Natural																	

Дополнительные Массы

Варианты цветов																		
Опаловая Эмаль Opal Enamel	Opal Amber																	
	Opal 1	Opal 2	Snow White	White	Vanilla	Milky	Mamelon-Vanilla	Mamelon-Orange	Mamelon-Yellow	Occlusal-Brown	Occlusal-Orange	Occlusal-Enamel						
Акцент Accent	T-Glass	T-Clear	T-Opacity	T-Buffer	T-Amber	T-Salmon	T-Gray	T-Violet	T-Blue	T-BabyPink	T-Pink	YellowOcher						
Супплемент Supplement	SUP-D	SUP-E	SUP-T															
Десневая Масса Gum	GUM-1	GUM-2	GUM-3															
Краситель Stain	Glaze	White	Milky	Light Orange	Orange	Brown	Dark Brown	Gray	Violet	Blue	Indigo	Pink	Dark Pink	Yellow	Khaki	Amber	Black	Buff

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Наборы керамической массы ZEO CE LIGHT

Набор пробный Starter Set (8 цветов)



Для ознакомления с керамикой ZEO CE LIGHT.
Основные массы популярного цвета А3 и сопутствующие компоненты.

Супер Опак паста 3,5 г - 1 шт.
Опак паста 3,5 г - 1 шт. (А3).
Опак-Дентин 20 г - 1 шт. (OD-A3).
Дентин 20 г - 1 шт. (D-A3).
Эмаль 20 г - 1 шт. (Е3).
Транслюцент 20 г - 1 шт. (T-Natural).
Акцент 20 г - 2 шт. (Opal 1, Snow White).
Жидкость Opaque Liquid для опака и супер опака 10 мл - 1 шт.

Набор стандартный Regular Set (31 цвет)



Основа для создания собственной палитры ZEO CE LIGHT.
Увеличенный перечень основных масс популярных цветов и сопутствующих компонентов.

Супер Опак паста 3,5 г - 1 шт.
Опак паста 3,5 г - 5 шт. (O-A2, O-A3, O-A3.5, O-B2, O-B3).
Опак-Дентин 20 г - 5 шт. (OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-B2, OD-B3).
Дентин 20 г - 5 шт. (D-A2, D-A3, D-A3.5, D-B2, D-B3).
Эмаль 20 г - 3 шт. (E-2, E-3, E-4).
Транслюцент 20 г - 1 шт. (T-Natural).
Акцент 20 г - 7 шт. (Opal 1, Snow White, Vanilla, Occlusal-Brown, Occlusal Orange, Occlusal Enamel, T-Amber).
Краситель 3,5 г - 4шт. (Light Orange, Orange, Brown, White).
Жидкость Modeling Liquid моделировочная 100 мл - 1 шт.
Жидкость Opaque Liquid для Опак и супер Опак 10 мл - 1 шт.
Жидкость Stain Liquid для красителей 10 мл - 1 шт.

Набор красок Stain Set (13 цветов)



13 красителей различных цветов, используемые для добавления цвета и индивидуализации работ.
Совмещают в себе внутренние и внешние красители.

Краситель 3,5 г - 13 шт. (White, Light Orange, Orange, Brown, Glaze, Milky, Dark Brown, Gray, Violet, Blue, Pink, Yellow, Black).
Жидкость Stain Liquid для красителей 10 мл - 1 шт.
Расцветка - 1 шт. (тип E).



Набор полный Full Set (69 цветов)



Передаёт все оттенки ZEO CE LIGHT.

Идеальный набор, если необходимы только основные компоненты.

Супер Опак паста 3,5 г - 1 шт.

Опак паста 3,5 г - 18 шт. (O-A0, O-A1, O-A2, O-A3, O-A3.5, O-A4, B0, O-B1, O-B2, O-B3, O-B4, O-C1, O-C2, O-C3, O-C4, O-D2, O-D3, O-D4).

Опак-Дентин 20 г - 18 шт. (OD-A0, OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B0, OD-B1, OD-B2, OD-B3, OD-B4, OD-C1, OD-C2, OD-C3, OD-C4, OD-D2, OD-D3, OD-D4).

Дентин 20 г - 18 шт. (D-A0, D-A1, D-A2, D-A3, D-A3.5, D-A4, D-B0, D-B1, D-B2, D-B3, D-B4, D-C1, D-C2, D-C3, D-C4, D-D2, D-D3, D-D4).

Плечевая Масса Margin 5 г - 5 шт. (M1, M2, M3, M4, M5).

Эмаль 20 г - 4 шт. (E1, E2, E3, E4).

Транслюцент 20 г - 1 шт. (T-Natural).

Краситель 3,5 г - 4шт. (White, Light Orange, Orange, Brown).

Жидкость Opaque Liquid для опак и супер опак 10 мл - 1 шт.

Жидкость Stain Liquid для красителей 10 мл - 1 шт.

Жидкость Modeling Liquid моделировочная 100 мл - 1 шт.

Сепаратор Margin Separator 3,5 мл - 1 шт.

Расцветка - 2 шт. (тип A, B).

Набор профессиональный Professional Set (28 цветов)



Данный набор позволит придать большую схожесть с натуральным зубом.

Акцент 20 г - 22 шт. (Mamelon-Orange, Occlusal-Brown, Occlusal Orange, Mamelon-Vanilla, Milky, Occlusal Enamel, Opal 1, Opal 2, Snow White, T-Amber, T-Baby Pink, T-Blue, T-Buffer, T-Clear, T-Glass, T-Gray, T-Opacity, T-Pink, T-Salmon, T-Violet, Vanilla, White).

Супплемент 5 г - 3 шт. (Sup-D, Sup-E, Sup-T).

Десневая масса 20 г - 3 шт. (Gum-1, Gum-2, Gum-3).

Краситель 3,5 г - 4шт. (Light Orange, Orange, Brown, White).

Жидкость Stain Liquid для опак и супер опак 10 мл - 1 шт.

Жидкость Modeling Liquid моделировочная 100 мл - 1 шт.

Сепаратор Margin Separator 3,5 мл - 1 шт.

Расцветка - 2 шт. (тип C, D).

Набор общий Total Set - 97 цветов (Full set + Professional Set)



Используя одновременно Full Set и Professional Set Вы сможете реализовать полный потенциал керамической массы ZEO CE LIGHT.

Full Set + Professional Set

Жидкость Opaque Liquid для опак и супер опак 10 мл - 1 шт.

Жидкость Stain Liquid для красителей 10 мл - 1 шт.

Жидкость Modeling Liquid моделировочная 100 мл - 1 шт.

Сепаратор Margin Separator 3,5 мл - 1 шт.

Расцветка - 4 шт. (тип A, B, C, D).

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Мировой Стандарт Керамических масс

ZEOQUICK - продукт, созданный на основе потребности в трехшаговом нанесении O-D-E(Опак-Дентин-Эмаль)




Продукция ZEOQUICK разрабатывалась, основываясь на потребности зубных техников в точности передачи цвета при простом нанесении материала. Благодаря точности подбора цвета Эмали, исключая этап нанесения Транслюцента, продукт ZEOQUICK стал универсальной керамической массой, предоставляя техникам легкость в исполнении работ. Керамика ZEOQUICK унаследовала такие физические свойства массы ZEO CE LIGHT, как прочность на изгиб, коэффициент теплового расширения и температура обжига. Это позволяет использовать модификаторы и красители ZEO CE LIGHT с ZEOQUICK для получения отличного результата.

Повышение эстетических показателей и индивидуализация работ



В керамике ZEOQUICK используются только базовые элементы (ОПАК + ДЕНТИН + ЭМАЛЬ) для упрощенной схемы нанесения. Однако, для повышения эстетических качеств работы можно воспользоваться большим количеством дополнительных материалов. **100% компонентов керамики ZEO CE LIGHT** (в том числе акценты и красители) сочетаемы с керамикой ZEOQUICK.

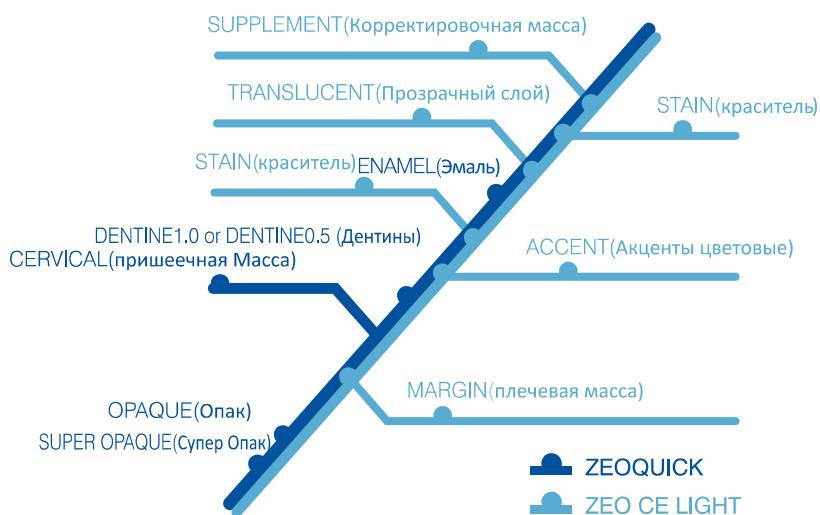

ZEOQUICK может использоваться в сочетании со специальными керамическими массами ZEO CE LIGHT, такими как Акцент Accent и Краситель Stain для получения отличных эстетических результатов.

Физические свойства аналогичны свойствам ZEO CE LIGHT

Прочность на изгиб

Программа обжига

Высокая адгезия


Твёрдость по Виккерсу

Коэффициент Теплового Расширения

Надежность в работе



Благодаря технологии контролируемого роста лейцитных кристаллов, керамика ZEOQUICK унаследовала такие выдающиеся физические характеристики материала керамической массы ZEO CE LIGHT, как устойчивость к сколам, высокая прочность на изгиб, прозрачность. Кроме того, отбор безопасных промышленных материалов, обеспечивает биосовместимость продукта с организмом.

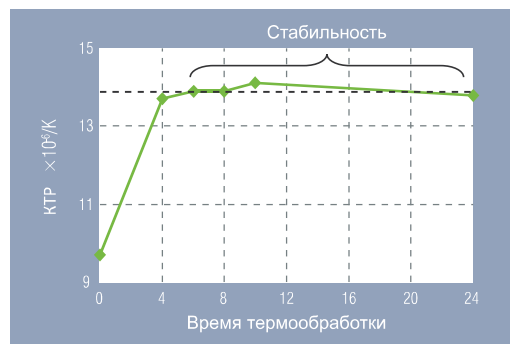

Стабильность КТР



Период стабильного действия более 20 часов.



Упрощенная схема нанесения для экономии времени



Использование металлокерамических реставраций является одним из самых известных способов в воспроизведении естественного эстетического вида натуральных зубов. В то же время, это сложная работа, требующая больших затрат времени со стороны зубных техников. Несмотря на то, что многие техники стараются облегчить процедуры для экономии времени, они должны следовать инструкции производителя, чтобы предотвратить возникновение механических повреждений на заключительном этапе. С уменьшением количества шагов нанесения массы возможно сокращение времени при отличных эстетических результатах. ZEOQUICK - продукт, созданный на основе потребности в трехшаговом нанесении О-Д-Е (Опак-Дентин-Эмаль).

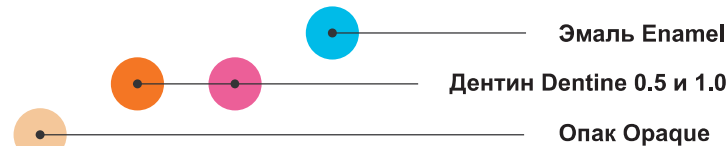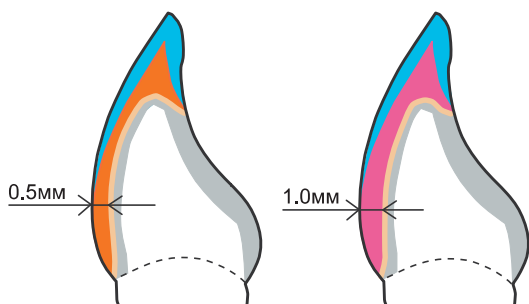

В зависимости от толщины слоя используется два типа Дентина - 0,5 и 1,0. Дентин 0,5 используется при достаточно тонком слое наносимого дентина.

Простота подбора оттенка



Зубных техников интересует точное соответствие цвета зуба пациента и металлокерамических реставраций. Керамика ZEOQUICK обладает идеальными характеристиками подбора оттенка и 100% попаданием в шкалу VITA. Для проверки оттенка в специальных условиях используется свет лампы накаливания, или флуоресцентной лампы, или естественный солнечный свет.

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Цветовая шкала ZEOQUICK

		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Супер Опак Super Opaque	7г паста 20, 50г порошок									●							
Опак Opaque	7г паста 20, 50г порошок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пришеечная масса Cervical	20, 50, 200г порошок	● C-1	● C-2	● C-3	● C-3	● C-1	● C-1	● C-3	● C-3	● C-4	● C-4	● C-5	● C-5	● C-4	● C-4	● C-5	● C-5
Дентин Dentine-0.5	20, 50, 200г порошок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дентин Dentine-1.0	20, 50, 200г порошок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Эмаль Enamel	20, 50, 200г порошок	● E-2	● E-3	● E-4	● E-4	● E-2	● E-2	● E-4	● E-4	● E-3	● E-3	● E-4	● E-4	● E-3	● E-3	● E-4	● E-4

Программа обжига (ZEO CE LIGHT & ZEOQUICK)

*1 Супер Опак Super Opaque, Опак Opaque. *2 Плечевая Масса Margin
*3 Опак-Дентин Opaque Dentine, Дентин Dentine, Эмаль Enamel, Опаловая Эмаль Opal Enamel, Транслюцент Translucent, Акцент Accent, Десневая Масса Gum.

Позиция/режим	Сушка (мин.)	Стартовая температура (°C)	Скорость подъёма (°C/мин.)	Температура обжига (°C)	Время выдержки (мин.)	Уровень вакуума (kPa) <cmHg>	
Опак *1	5-10	450-500	60	920	1	97<73>	
Плечевая масса *2	6-9	550-600		900			
Дентин *3				880			Атмосферный
Дополнительные обжига	4	550-600		790-830*4		97<73>	
Глазурь	6			820			
Коррекционная масса	4			880			Атмосферный
Краска(внутр.)							
Краска(наружн.)							

Сплавы Ni-Cr и Co-Cr обладают меньшим КТР, поэтому рекомендуется увеличить время обжига, чтобы избежать недостаточного обжига (неспекания). Это обеспечивает керамике достаточную прочность и предотвращает появление трещин даже при растяжении изделия. Поэтому строго рекомендуется использовать следующую программу обжига, особенно при работе с имплантатами, в которых применяется большой объем металла.

	Время сушки (мин)	Стартовая температура (°C)	Значение вакуума	Скорость подъёма (°C/мин.)	Температура обжига (°C)	Время выдержки (мин.)
Опак *1	5~10	450~500	○	60	940	2~3
Дентин *3	6~9	550~600	○	60	920	2~3

*4 Обжигайте при более низкой температуре, если глянец нежелателен. Обжигайте при более высокой температуре, если необходимо добиться глянцевой поверхности. Примечание. В зависимости от условий обжига могут отсутствовать изначальные показатели. Пожалуйста, воспользуйтесь нижеприведенной информацией.

Условия обжига могут отличаться в зависимости от типов и формы печей. Отрегулируйте температурный режим в диапазоне ±20°C. Для Opaque - слегка глянцевая поверхность, для Dentine - легкий блеск.



Стремится быть надежным производителем стоматологического материала

Компания YAMAKIN Co., LTD. стремится обеспечить клиентов безопасным, надежным, высококачественным продуктом, удовлетворяющим высоким потребностям пользователей. Для выполнения данного обязательства в компании YAMAKIN Co., LTD. установили строгие критерии:

Система Менеджмента Качества в соответствии со Стандартом ISO

Деятельность **YAMAKIN Co., LTD.** была проверена и одобрена экспертной организацией Германии, с целью получения сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 (Система Менеджмента Качества Медицинских изделий). Мы внедрили передовые системы контроля качества высокого уровня как производитель Медицинских изделий.



Пост-продажная поддержка качества


Для получения объективных результатов оценки качества, был создан независимый мониторинг системы продаж под руководством генерального директора департамента маркетинга. Отдельный менеджер отвечает за надлежащее исполнение качества на практике; ответственным за этот участок назначен руководитель управления безопасностью. Информация, поступающая из клинической практики, отслеживается компанией YAMAKIN Co., LTD.



Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN
Factory and R&D: Kochi, JAPAN
P: +81-6-6761-8338 F: +81-6-6761-0610
E: contact@yamakin-gold.co.jp
<http://www.yamakin-gold.co.jp>



ISO 9001/13485
ISO 14001
CERTIFIED

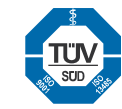

Scope:
Headquarters and Kochi Plant



QAIC/JP/0455
Scope: Kochi Plant

CE 0123

INTERNATIONAL20120310

⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.



Dental-East

**Стоматологические
оборудование и материалы**

ООО «Дентал-Ист» 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А.

Тел./Факс: 8 (800) 222-77-05 (многоканальный), (499) 458-67-37,

(499) 458-73-27, (499) 745-63-16, (499) 745-63-20.

E-mail: sales@dental-east.ru, Сайт: www.dental-east.ru

Наш партнёр
интернет-магазин
a3-dent.ru

оборудование и материалы
для стоматологии
A3-DENT.RU

